

SURFACE HARDENER

RIFINITORE PER COMPOSITI



Prodotto per uso odontoiatrico
Tenere lontano dalla portata dei bambini
Data delle specifiche: 07/2019

Confezioni in commercio:

2 siringhe da 5 ml e 12 puntali **REF SURF 1**

Caratteristiche

DEI® Surface Hardener è un gel trasparente che ha la funzione di inibire l'ossigeno di superficie permettendo una totale polimerizzazione dei materiali compositi e compomeri.

Composizione

Polyol, acqua, pyrogenic silica.

Modo d'impiego

Applicare il gel con un pennellino sulla superficie da polimerizzare. Procedere con la fotopolimerizzazione. Rimuovere il gel con spray d'acqua e asciugare. La superficie risulterà perfettamente indurita e pronta alla lucidatura.

Avvertenze

In caso di sensibilità individuale ai componenti non impiegare il prodotto.

Conservazione e validità

Conservare a temperatura inferiore a 25°C.



Via Torino, 765 - 21020 Mercurio (VA) Italy
Tel. +39 0331 969270 - Fax +39 0331 969271
www.deiitalia.it